


# Rychlotest Helix i-SARS-CoV-2 Ag

## Imunochromatografická detekce přítomnosti antigenu SARS-CoV-2

- Výsledek za 15 minut, snadné použití
- Optimalizováno pro použití vzorků z výtěru nosohltanu či zadní části ústní dutiny
- Možno použít i pro vzorky uchované ve virovém transportním médiu
- Vhodné pro screening na letištích, v podnicích, hotelech, domovech důchodců a sociálních zařízeních atp.
- Balení obsahuje materiál pro analýzu 25 vzorků (25x stěrová tyčinka, 2x pufr, 25x extrakční zkumavka a 25x testovací kazeta)
- Určeno pouze pro použití zdravotnickým personálem. Není určeno pro domácí testování.

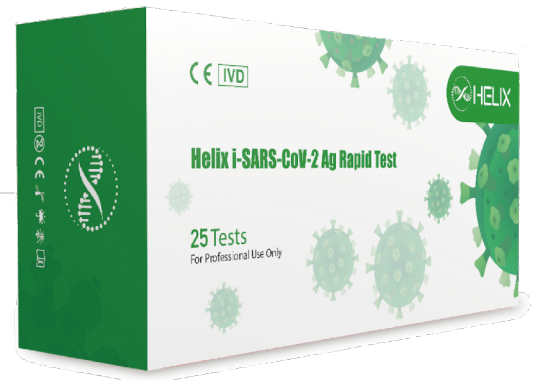

### CITLIVOST A SPECIFICITA

Rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag byl validován s použitím 161 klinických vzorků a použitím PCR jako referenční metody. Validace prokázala, že rychlotest i-SARS-CoV-2 Ag vykazuje vysokou citlivost 94,6 %, specifitu 99,5 %, přesnost 98,6 %.


OBJEDNEJTE V E-SHOPU



Ref: i-101

### PŘÍPRAVA VZORKU


Extrakce vzorku z výtěrové tyčinky

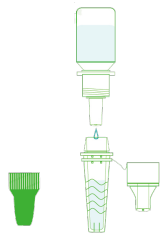

Přidejte 12 kapek extrakčního pufru do extrakční zkumavky




Vložte tyčinku do extrakční zkumavky a alespoň šestkrát s ní otočte.

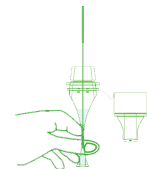

Několikrát tyčinku stiskněte z vnější strany zkumavky. Tyčinku vyjměte stisknutím zkumavky.

Zkušební postup

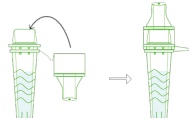

Nasadte vstříkovací víčko na extrakční zkumavku.



Otočte extrakční zkumavku se vzorkem a kápněte 3 kapky (cca 60-80 µl) vzorku do vzorkovacího okénka.


VÝSLEDKY




Po 15 - 20 minutách odečtete výsledky.

Interpretace výsledků


NEGATIVNÍ

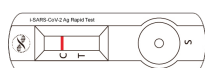

POZITIVNÍ

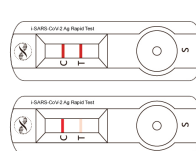

NEPLATNÝ

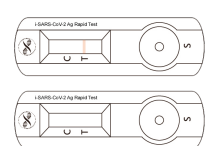

IVD CE